



INSTRUCCIONES DE USO DEL TRITURADOR MANUAL MAXCRUSHTM™

El triturador MAXCRUSH™ M300 y los vasitos MAXCRUSH™ son un sistema eficaz de trituración de pastillas en forma de polvo para su fácil administración. ÚNICAMENTE se pueden utilizar en el triturador MAXCRUSH™ M300 los vasitos garantizados por MAXCRUSH™.

Intrucciones de uso

1. Su triturador de pastillas viene con dos pequeños vasitos de tamaños diferentes. Coja el más pequeño y encájelo en la parte superior de la palanca de trituración (tiene un encaje perfecto). Los vasitos son fáciles de limpiar y reutilizables.
2. Coloque la medicación en el vasito más grande y sitúelo en la base del triturador, quedando directamente debajo de la palanca de trituración.
3. Baje cuidadosamente la palanca sobre el vasito situado debajo (para mantener el vasito en su sitio, sosténgalo ligeramente con la punta de los dedos). Si desea triturar más veces seguidas gire un poco el vasito inferior para asegurar cada trituración.



Limpieza y Mantenimiento

El único cuidado que requiere su triturador manual MAXCRUSH™ M300 es la limpieza ocasional con un trapo húmedo.

Garantía limitada

El fabricante garantiza un año de garantía del triturador manual M300 desde la fecha de compra salvo los defectos de las piezas debidos al trabajo causados por la mano de obra y el uso funcional de la vida útil del producto. Use ÚNICAMENTE los vasitos MAXCRUSH™ con el triturador manual MAXCRUSH™ M300. El uso de otros vasitos o contenedores o el mal uso del triturador anula la garantía del producto.